

Les instructions ci-dessous sont destinées à servir de référence aux soignants qui ont déjà utilisé une pompe à insuline et ont une bonne connaissance de l'insulinothérapie en général. Les écrans ne sont pas tous illustrés. Pour de plus amples détails sur le fonctionnement de la pompe à insuline t:slim X2, veuillez vous reporter à son guide d'utilisation.



1 Touchez **0 grammes** pour saisir les glucides pour le bolus de l'utilisateur.

Remarque : Si cette zone indique « unités », la fonction des glucides est désactivée dans le profil en cours.



2 Saisissez la valeur souhaitée. Assurez-vous que « grammes » est affiché au-dessus du clavier pour les bolus repas. Touchez pour continuer.




3 Touchez **Ajouter glyc.** pour saisir votre glycémie.

Remarque : Si certaines fonctionnalités avancées sont utilisées, la valeur affichée sur le dispositif de SGC Dexcom G6 peut être générée automatiquement dans la calculatrice de bolus. Veuillez consulter le guide d'utilisation pour en savoir plus.



4 Saisissez la valeur souhaitée. Assurez-vous que « mmol/L » est affiché au-dessus du clavier lors de la saisie des valeurs de glycémie.

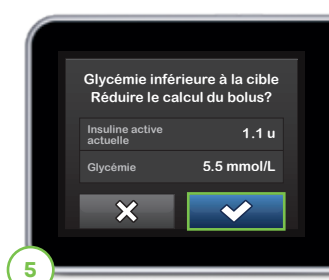

5 Si la glycémie saisie est inférieure à la cible mais supérieure à 3,9 mmol/L, vous aurez la possibilité de réduire la quantité de bolus. Touchez pour accepter cette réduction; sinon, touchez .



6 Touchez la valeur des unités calculées pour ajuster manuellement la dose recommandée. Touchez pour continuer.



7 Vérifiez la dose et touchez pour confirmer.

Remarque : Les calculs ci-dessus sont basés sur des ratios insuline-glucides et des facteurs de correction prédéfinis; ils peuvent être réglés dans Profils personnels.



8 Touchez pour administrer immédiatement le bolus repas. L'écran BOLUS LANCÉ s'affiche pour confirmer le démarrage de l'administration.



9 Pour annuler la partie du bolus non administrée, touchez la croix en face de BOLUS sur l'écran d'accueil, puis touchez pour confirmer l'annulation du bolus.

Renseignements importants sur la sécurité : Les pompes à insuline Tandem sont conçues pour l'administration sous-cutanée d'insuline, à des débits fixes et variables, pour la prise en charge du diabète chez les personnes ayant besoin d'insuline. L'utilisation de la pompe à insuline t:slim X2 est approuvée chez les personnes de 6 ans et plus. Pour consulter des renseignements importants sur la sécurité, veuillez visiter tandemdiabetes.com/safetyinfo.

© Tandem Diabetes Care, Inc., 2022. Tous droits réservés. Tandem Diabetes Care et t:slim X2 sont des marques déposées ou des marques de commerce de Tandem Diabetes Care, Inc. aux États-Unis ou dans d'autres pays. Dexcom et Dexcom G6 sont des marques déposées de Dexcom, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques de tierces parties appartiennent à leurs propriétaires respectifs. ML-1004823_B

