



1

Pour ouvrir, tirez sur la bande rouge pour retirer le sceau en plastique stérile. Retirez le papier.

▲ Attention : NE PAS utiliser si le sceau ou le papier stérile est déchiré.

■ Remarque : Nettoyer la zone d'insertion avec un tampon imbibé d'alcool ou une autre préparation cutanée recommandée.



2

Retirez le couvercle en appuyant fermement d'une main sur les trois points en relief de chaque côté et soulevez la languette plate du couvercle avec l'autre main.

▲ Attention : NE PAS toucher ou courber l'aiguille d'introduction.



3

Décrochez la tubulure de l'encoche sur le dispositif d'insertion, puis déroulez-la délicatement. Arrêtez-vous une fois parvenu à la fin.

▲ Attention : Veiller à ce que le dispositif d'insertion ne se détache pas du boîtier de la canule.



4


Pour fixer la tubulure de l'ensemble de perfusion au connecteur t:lock sur le réservoir, tournez le connecteur dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit bien serré, puis tournez d'un quart de tour supplémentaire pour assurer une connexion sécurisée.



5

Remplissez la tubulure conformément aux instructions du guide d'utilisation de la pompe à insuline Tandem Diabetes Care.

▲ Attention : NE PAS remplir la tubulure lorsque l'ensemble de perfusion est relié à vous.

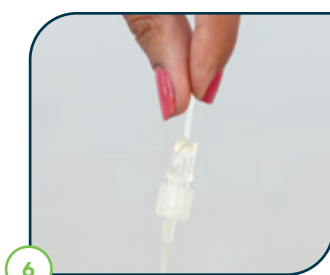

6

Lors du remplissage de la tubulure, orientez l'aiguille d'introduction vers le bas et maintenez la tubulure droite vers le haut au niveau du connecteur t:lock. Assurez-vous que la tubulure ne contient aucune bulle d'air.



7

Arrêtez une fois que trois gouttes d'insuline sortent de l'aiguille d'introduction.

■ Remarque : Les volumes de remplissage approximatifs sont 10 à 15 unités pour une tubulure de 60 cm, et 20 à 25 unités pour une tubulure de 110 cm.



8


Tirez délicatement sur le papier support pour le retirer du ruban adhésif.

▲ Attention : Veiller à ne pas tirer trop fort sur le papier support.




9

Assurez-vous que la tubulure est libre (n'est pas coincée dans l'encoche), puis appuyez sur les côtés striés et tirez sur le chargeur à ressort jusqu'à ce que vous entendiez un dé clic.

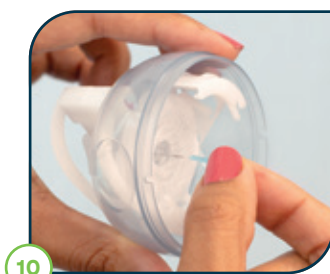

10


Retirez le protège-aiguille de l'aiguille d'introduction en la dévissant délicatement et en la tirant.

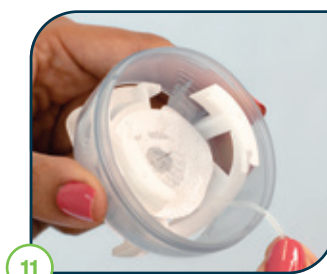

11

Faites glisser la tubulure dans l'encoche la plus proche.

▲ Attention : Si l'aiguille d'introduction n'est pas droite, des douleurs ou de légères blessures peuvent se produire lors de l'insertion.

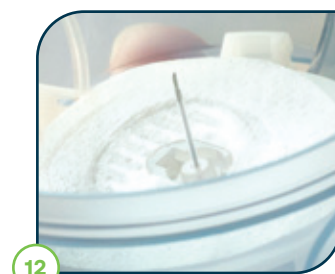

12

Avant l'insertion, il convient de vérifier que la canule en plastique se trouve sous la pointe de l'aiguille d'introduction.



13

Appuyez simultanément sur les côtés ronds et plats du dispositif d'insertion pour l'insérer.

■ **Remarque** : Le triangle à l'intérieur du dispositif d'insertion est dirigé du côté auquel la tubulure fera face.



14

Appuyez fermement au dos du dispositif d'insertion pour faire adhérer le ruban adhésif sur la peau.

■ **Remarque** : Si cette étape n'est pas suivie, la canule risque de se courber et/ou le dispositif d'insertion de se détacher prématurément.



15

Tout en maintenant les languettes blanches du dispositif d'insertion, tirez délicatement pour retirer l'aiguille d'introduction. Massez le ruban sur la peau.



16

Remplissez la canule avec 0,3 unité (canules de 6 mm) ou 0,5 unité (canules de 9 mm). Remettez le couvercle en place sur le dispositif d'insertion avant de le jeter.

▲ **Attention** : TOUJOURS vérifier le taux de glycémie 1 à 2 heures après l'insertion pour vérifier le bon fonctionnement.

Débranchement



1

Placez votre doigt devant le boîtier de la canule, appuyez doucement de chaque côté près du centre du connecteur, puis retirez l'aiguille du connecteur en tirant tout droit.



2

Insérez la protection de débranchement dans le boîtier de la canule.



1

Retirez le capuchon de protection circulaire de l'aiguille du connecteur. Au besoin, remplissez l'ensemble de perfusion en orientant l'aiguille vers le bas jusqu'à ce que des gouttes d'insuline sortent de l'aiguille.

▲ **Attention** : NE PAS remplir la tubulure lorsque l'ensemble de perfusion est relié à vous.



2

Retirez la protection de débranchement. Insérez l'aiguille du connecteur dans le boîtier de la canule. Vous devriez entendre un dé clic.

Cette fiche de référence vient compléter les instructions fournies avec votre ensemble de perfusion AutoSoft 90. Veuillez vous reporter à ces instructions (téléchargeables à partir du site tandemdiabetes.com/support) pour consulter une liste complète des avertissements et mises en garde.

Renseignements importants sur la sécurité : Attention : Selon la loi fédérale des États-Unis d'Amérique, ce dispositif ne peut être vendu que par un médecin ou sur son ordonnance. Ces ensembles de perfusion sont destinés à la perfusion sous-cutanée d'insuline administrée par la pompe à insuline t:slim X2 pour le traitement du diabète. Ces ensembles de perfusion sont destinés à l'usage d'un seul patient. Pour consulter les contre-indications, avertissements, mises en garde et d'autres renseignements importants, veuillez vous reporter au mode d'emploi accompagnant les ensembles de perfusion.

© 2022 Tandem Diabetes Care, Inc. Tous droits réservés. Tandem Diabetes Care, AutoSoft, t:lock et t:slim X2 sont des marques déposées ou des marques de commerce de Tandem Diabetes Care, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques de tierces parties appartiennent à leurs propriétaires respectifs. ML-1010480_A