



1


Ouvrez l'emballage et retirez le capuchon de protection de l'aiguille du connecteur.

**Remarque :** Nettoyer la zone d'insertion avec un tampon imbibé d'alcool ou une autre préparation cutanée recommandée.



2

Maintenez l'aiguille du connecteur à l'endroit où elle est branchée à la tubulure et insérez-la dans le boîtier de raccordement. Vous devriez entendre un déclic.

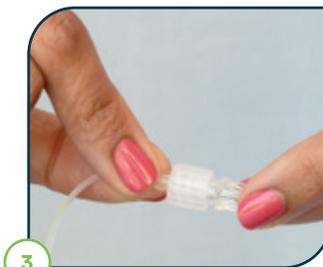

3

Pour fixer la tubulure de l'ensemble de perfusion au connecteur t:lock sur le réservoir, tournez le connecteur dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit bien serré, puis tournez d'un quart de tour supplémentaire pour assurer une connexion sécurisée.



4


Remplissez la tubulure conformément aux instructions détaillées du guide d'utilisation de la pompe à insuline Tandem Diabetes Care.

**Attention :** NE PAS remplir la tubulure lorsque l'ensemble de perfusion est relié à vous.




5

Lors du remplissage de la tubulure, orientez l'aiguille en acier vers le bas. Assurez-vous que la tubulure ne contient pas d'air. Arrêtez une fois que trois gouttes d'insuline sortent de l'aiguille.

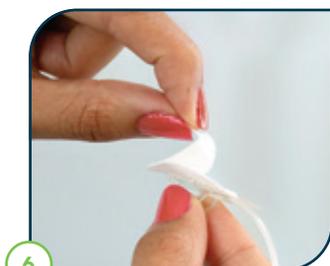

6

Tout en maintenant les ailettes de retenue de l'ensemble de perfusion, retirez délicatement le papier support sous l'aiguille.

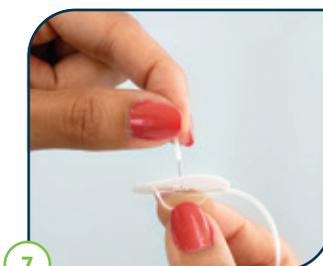

7

Dévissez délicatement le protège-aiguille et retirez-le de l'aiguille en acier.



8

Pincez la peau d'une main au point d'insertion choisi pour la détacher de tout tissu musculaire.



9

Insérez l'aiguille et relâchez la peau pincée.



10

Massez le ruban adhésif sur la peau fermement sur la peau.

**Attention :** NE PAS tenter de redresser l'adhésif s'il s'enroule.



11

Retirez le papier support du boîtier de raccordement et collez-le à un endroit où il pourra facilement être accessible.

**Remarque :** S'assurer que la tubulure entre l'aiguille d'introduction et le boîtier n'est pas trop tendue.




12

Sautez l'étape de remplissage de la canule du processus de chargement, réglez votre Rappel du site sur 48 heures, selon le type d'insuline, puis reprenez l'administration d'insuline.

**Attention :** TOUJOURS vérifier le taux de glycémie 1 à 2 heures après l'insertion pour vérifier le bon fonctionnement.

## Débranchement

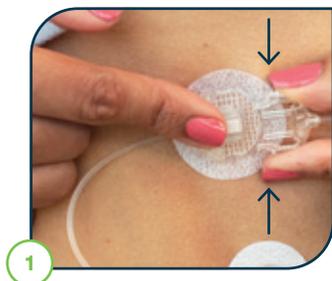

1

Placez votre doigt devant le boîtier de raccordement, appuyez doucement de chaque côté du connecteur et retirez l'aiguille du connecteur en tirant tout droit.



2

Insérez le capuchon de protection circulaire dans l'aiguille du connecteur.



3


Insérez la protection de débranchement dans le boîtier de raccordement.

## Rebranchement



1

Retirez le capuchon de protection de l'aiguille du connecteur.

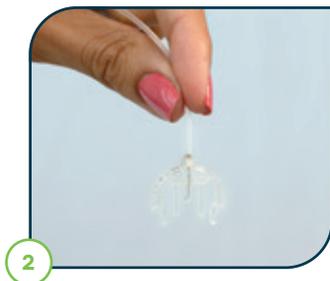

2


L'aiguille étant pointée vers le bas, remplissez la tubulure jusqu'à ce qu'une goutte d'insuline sorte de l'aiguille.

**⚠ Attention : NE PAS** remplir la tubulure lorsque l'ensemble de perfusion est relié à vous.



3

Retirez la protection de débranchement du boîtier de raccordement.

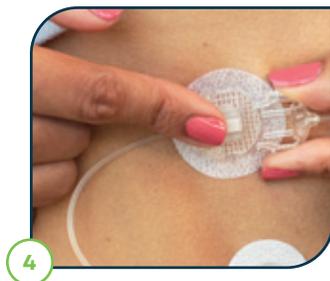

4

Maintenez l'aiguille du connecteur et insérez-la dans le boîtier de raccordement. Vous devriez entendre un dé clic.

Cette fiche de référence vient compléter les instructions fournies avec votre ensemble de perfusion AutoSoft TruSteel. Veuillez vous reporter à ces instructions (téléchargeables à partir du site [tandemdiabetes.com/support](https://tandemdiabetes.com/support)) pour consulter une liste complète des avertissements et mises en garde.

**Renseignements importants sur la sécurité :** Attention : Selon la loi fédérale des États-Unis d'Amérique, ce dispositif ne peut être vendu que par un médecin ou sur son ordonnance. Ces ensembles de perfusion sont destinés à la perfusion sous-cutanée d'insuline administrée par la pompe à insuline t:slim X2 pour le traitement du diabète. Ces ensembles de perfusion sont destinés à l'usage d'un seul patient. Pour consulter les contre-indications, avertissements, mises en garde et d'autres renseignements importants, veuillez vous reporter au mode d'emploi accompagnant les ensembles de perfusion.

© 2022 Tandem Diabetes Care, Inc. Tous droits réservés. Tandem Diabetes Care, TruSteel, t:lock et t:slim X2 sont des marques déposées ou des marques de commerce de Tandem Diabetes Care, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques de tierces parties appartiennent à leurs propriétaires respectifs. ML-1010477\_A