



Configure un régimen basal temporal en la bomba de insulina t:slim X2


Las instrucciones que se encuentran a continuación se proporcionan como una herramienta de referencia para los cuidadores que ya están familiarizados con el uso de una bomba de insulina y con la terapia con insulina en general. No se muestran todas las pantallas. Consulte la Guía del usuario para obtener más información detallada sobre la operación de la bomba de insulina Tandem t:slim X2™.

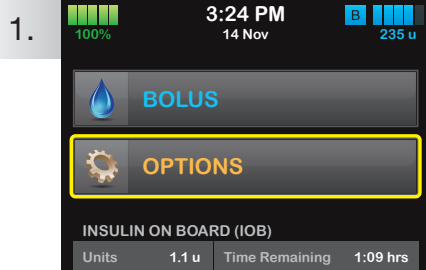

1. Presione **OPTIONS** (OPCIONES).

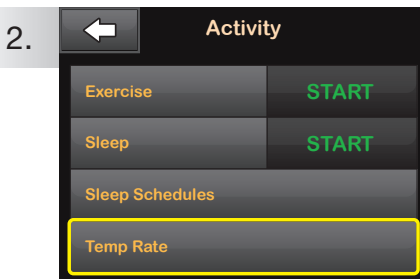



2. En el menú **Activity** (Actividad), presione **Temp Rate** (Régimen temporal).

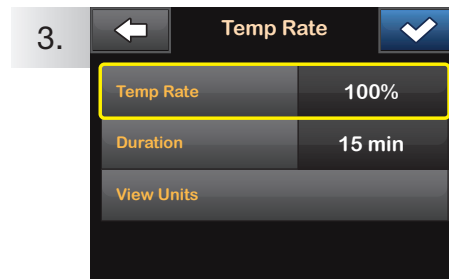


3. Presione **Temp Rate** (Régimen temporal).


NOTA: Para los usuarios de tecnología Control-IQ™, los regímenes temporales solo están disponibles cuando la tecnología Control-IQ está apagada.

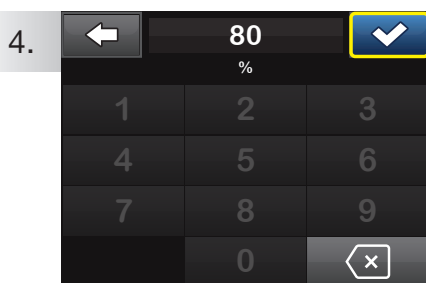


4. Ingrese el porcentaje deseado con el teclado de la pantalla. Presione .


NOTA: El régimen actual es 100 %. Un aumento es mayor al 100 %, y una disminución es menor al 100 %.

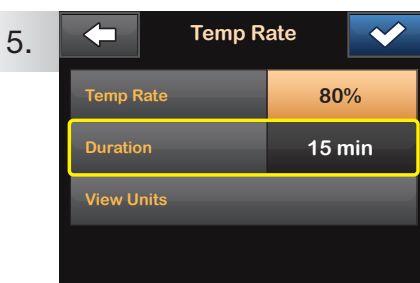

5. Presione **Duration** (Duración). Ingrese la duración deseada del régimen temporal con el teclado de la pantalla. Presione .


NOTA: Para ver las unidades reales que se suministrarán, presione Ver unidades.

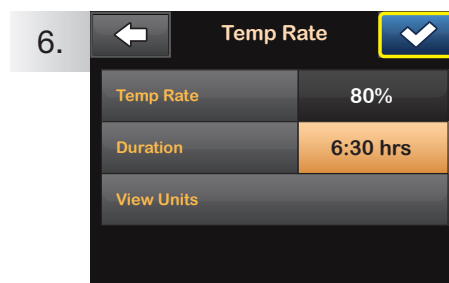

6. Verifique la configuración y presione .




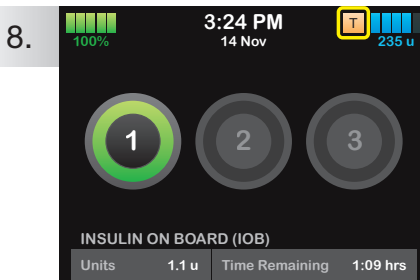

7. Aparecerá la pantalla **TEMP RATE STARTED** que confirma que el régimen temporal comenzó.



8. Aparecerá la pantalla de bloqueo con el icono de **T** anaranjado que indica que hay un régimen temporal activo.

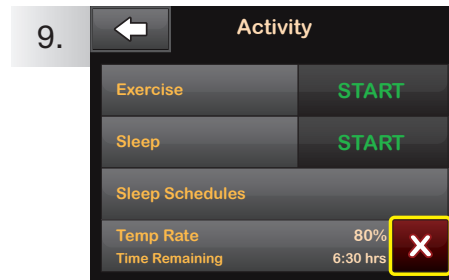NOTA: Si un Régimen temporal de 0 % está activo actualmente, el icono de **T** anaranjado se reemplazará por un icono de **T** rojo.



NOTA: Para detener un Régimen temporal en cualquier momento, presione **OPTIONS** (OPCIONES), luego **Activity** y presione . Aparecerá una pantalla de confirmación. Presione .



TANDEM
DIABETES CARE

(877) 801-6901
tandemdiabetes.com

t:simulator App
Una demostración virtual gratuita de la bomba

