



SISTEMA TANDEM MOBI

## Cargar un cartucho




En esta guía se explica cómo cargar un cartucho de Tandem Mobi, el cual contiene un máximo de 200 unidades de insulina, en la bomba de insulina Tandem Mobi.

Antes de comenzar, asegúrese de llenar un cartucho nuevo con insulina. **Encontrará instrucciones detalladas** al dorso.




■ **Nota:** Estas instrucciones sirven de referencia para los usuarios de la bomba y los cuidadores que ya estén familiarizados con el uso de bombas de insulina y con la terapia de insulina en general. No se muestran todas las pantallas. Para obtener información más detallada sobre el manejo del sistema Tandem Mobi, consulte su respectiva guía del usuario.

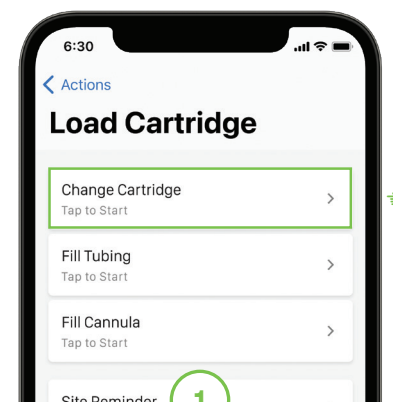

Toque **Change Cartridge** (Cambiar cartucho). Toque **Yes** (Sí) para confirmar que se suspenderán las administraciones de insulina.




Desconecte el equipo de infusión del sitio de inserción (en el cuerpo del usuario) y toque **Continue** (Continuar).

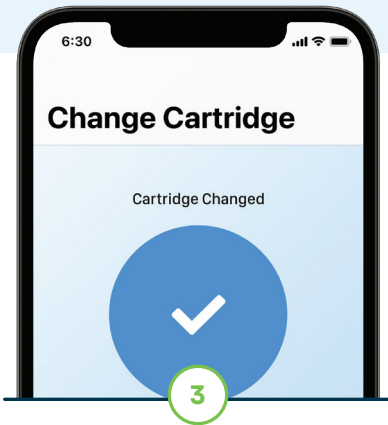

Retire el cartucho vacío y coloque el cartucho lleno en la bomba. Toque **Continue** (Continuar).


Se mostrará la pantalla Cartridge Changed (Cartucho cambiado). Toque **Continue** (Continuar).

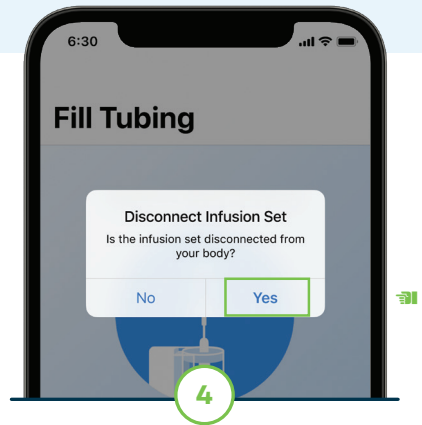


Conecte el tubo del equipo de infusión al respectivo conector en el cartucho. Toque **Continue** (Continuar) y luego **Yes** (Sí) para confirmar que el equipo de infusión sigue desconectado.



Sostenga la bomba y el tubo verticalmente para asegurarse de que el aire del cartucho salga primero. Mantenga presionado el botón de la **bomba** para llenar el tubo.

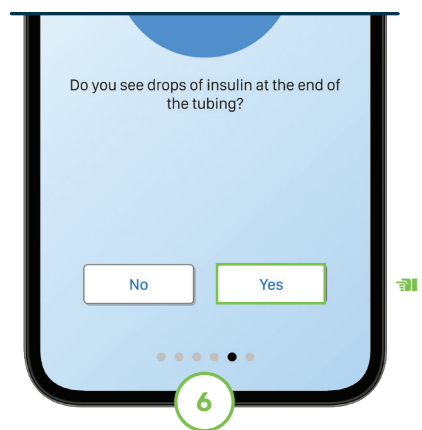


Suelte el botón de la bomba cuando vea salir tres gotas de insulina por el extremo del tubo del equipo de infusión. Toque **Yes** (Sí) para continuar.

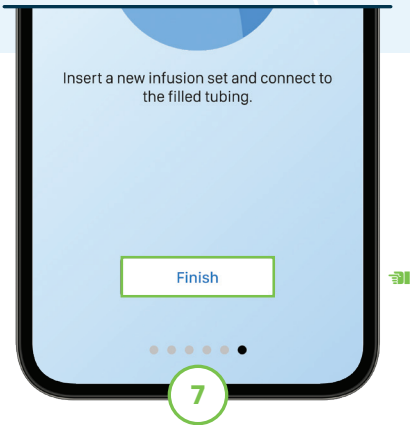

Inserte el equipo de infusión nuevo o reconecte el tubo lleno al sitio; luego toque **Finish** (Terminar).

🚩 **Nota:** Salte al paso 10 si no insertó un equipo de infusión nuevo o si está usando un equipo de infusión TruSteel.

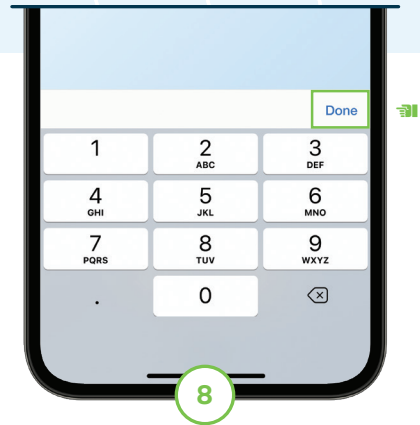


Toque **Fill Cannula** (Llenar cánula). Ingrese la cantidad necesaria y toque **Done** (Listo). Toque **Start** (Iniciar) para continuar.

🚩 **Nota:** En las instrucciones del equipo de infusión encontrará información sobre la cantidad adecuada de llenado de la cánula.



Se mostrará la pantalla **Cannula Filled** (Cánula Llena). Toque **Finish** (Terminar).

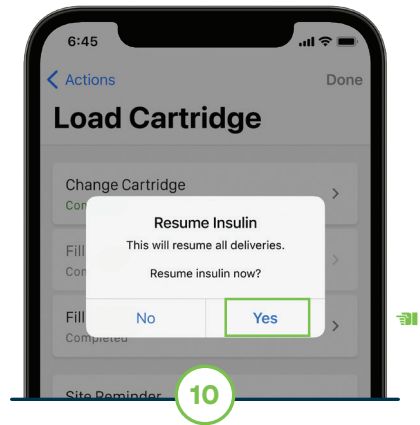

Toque **Done** (Listo) y luego **Yes** (Sí) para confirmar que se reanuden todas las administraciones de insulina. Se mostrará un recordatorio de hacerse una prueba de glucemia (BG) en 1 o 2 horas.

## Llenado del cartucho de Tandem Mobi



**▲ Advertencia:** Algunos productos para el cuidado de la piel como lociones, protectores solares y repelentes de insectos pueden causar grietas en el plástico utilizado en la fabricación de la bomba y el cartucho. NO deje que estos productos entren en contacto con la bomba o el cartucho. SIEMPRE lávese las manos antes de manipular la bomba o el cartucho después de utilizar dichos productos.

- 01 Reúna un frasco de insulina, una toallita con alcohol, un equipo de cartucho nuevo y un equipo de infusión; luego abra la aplicación móvil Tandem Mobi.
- 02 Deje que la insulina alcance la temperatura ambiente.

Abrir para continuar →

\*La bomba de insulina Tandem Mobi solo puede emparejarse con una aplicación móvil Tandem Mobi a la vez. Al emparejar la bomba con una aplicación móvil nueva se eliminará la conexión con los dispositivos previamente conectados.

**Información de seguridad importante:** VENTA BAJO RECETA. **Indicaciones de uso:** Bomba de insulina Tandem Mobi con tecnología interoperable: la bomba de insulina Tandem Mobi con tecnología interoperable (la bomba) está destinada a la administración subcutánea de insulina a velocidades fijas y variables para el manejo de la diabetes mellitus en personas insulino dependientes. La bomba puede comunicarse de forma fiable y segura con dispositivos compatibles conectados por vía digital —lo que incluye un software de administración automatizada de insulina— para recibir, ejecutar y confirmar los comandos de estos dispositivos. La bomba está diseñada para usarse en el hogar en un solo paciente y requiere una receta médica. La bomba está indicada para personas mayores de 6 años de edad. Tecnología Control-IQ: la tecnología Control-IQ está destinada a usarse con un MCGi compatible (que se adquiere aparte) y una bomba ACE para aumentar, disminuir y suspender automáticamente la administración de la insulina basal según los valores del MCGi y los valores de glucosa previstos. También puede administrar bolos de corrección cuando se prevé que el valor de la glucosa superará un umbral predefinido. La tecnología Control-IQ está indicada para el tratamiento de la diabetes mellitus de tipo 1 en personas mayores de 6 años de edad. La tecnología Control-IQ está destinada a usarse en un solo paciente. Está indicada para su uso con las insulinas NovoLog o Humalog U-100.

**ADVERTENCIA:** La tecnología Control-IQ no debe usarse en personas menores de 6 años de edad. Tampoco debe usarse en pacientes que requieran menos de 10 unidades de insulina al día o que pesen menos de 55 libras.

La tecnología Control-IQ no está indicada para usarse en mujeres embarazadas, personas que estén recibiendo diálisis o pacientes gravemente enfermos. No use la tecnología Control-IQ si está recibiendo hidroxiurea. Los usuarios de la bomba de insulina Tandem y la tecnología Control-IQ deben: usar la bomba de insulina, el MCGi y todos los demás componentes del sistema según sus respectivas instrucciones de uso; medirse los niveles de glucosa en sangre según las recomendaciones de su profesional del cuidado de la salud; demostrar habilidades adecuadas para contar carbohidratos; mantener habilidades adecuadas de autocuidado de la diabetes; consultar periódicamente con profesionales del cuidado de la salud; y tener capacidades visuales y/o auditivas adecuadas para reconocer todas las funciones de la bomba, incluidos sus alertas, alarmas y recordatorios. La bomba Tandem y el transmisor con el sensor de MCGi (si procede) deben retirarse antes de una resonancia magnética, una tomografía computarizada o un tratamiento de diatermia. Visite [tandemdiabetes.com/safetyinfo](https://tandemdiabetes.com/safetyinfo) para ver más información importante de seguridad.

© 2023 Tandem Diabetes Care, Inc. Todos los derechos reservados. Tandem Diabetes Care, el logotipo de Tandem, Control-IQ y Tandem Mobi son marcas registradas o marcas comerciales de Tandem Diabetes Care, Inc. en Estados Unidos y/u otros países. ML-1013530\_A







**TANDEM**  
Diabetes Care

(877) 801-6901  
[tandemdiabetes.com](https://tandemdiabetes.com)

PARA USO EXCLUSIVO  
EN ESTADOS UNIDOS



- 03 Inspeccione el equipo del cartucho y deseche el producto si está dañado.
- 04 Lávese las manos y limpie el tapón de goma del frasco de insulina con una toallita con alcohol.
- 05 Saque el conjunto del cartucho de su envase estéril.
- 06 Jale de la varilla de llenado hasta llegar abajo completamente y luego súbala para expulsar el aire del cartucho **(vea la imagen A)**.
- 07 Baje la varilla de llenado hasta el volumen deseado. El anillo superior del émbolo debe alinearse con el marcador de volumen deseado.
- 08 Con el frasco de insulina en posición vertical y colocado sobre una superficie plana, coloque el adaptador del frasco encima del tapón de goma de la insulina y presiónelo con fuerza hasta que entre.
- 09 Empuje la varilla de llenado hacia abajo para empujar el aire del cartucho al interior del frasco y mantenga la presión sobre la varilla de llenado **(véase la imagen B)**.
- 10 Voltee el conjunto con el frasco aún sujeto y suelte poco a poco la varilla de llenado. Es posible que la insulina comience a fluir del frasco.
- 11 Retraiga lentamente la varilla de llenado hasta el volumen deseado **(véase la imagen C)**.
- 12 Retire el frasco del adaptador **(véase la imagen D)**.

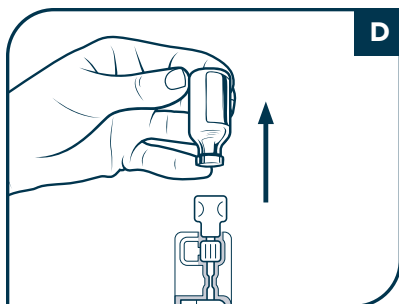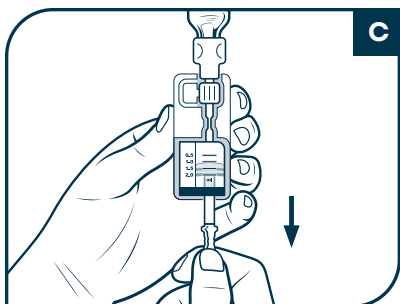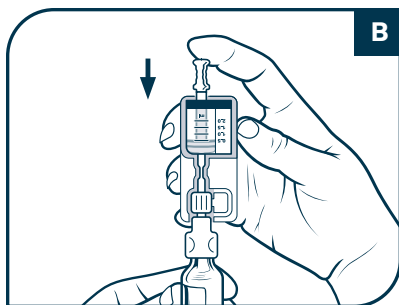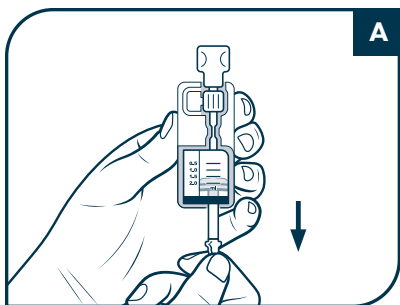

- 13 Inspeccione todos los lados del cartucho para ver si tiene burbujas. El aire en el interior del cartucho puede ocupar espacio donde pertenece la insulina.
- 14 Sostenga el cartucho totalmente vertical y dé un toquecito para que las posibles burbujas suban a la parte de arriba (**véase la imagen E**).
- 15 Empuje muy lentamente la varilla de llenado para sacar las burbujas de aire del cartucho.
- 16 Repita los pasos 13 a 15 hasta que no queden burbujas.
- 17 Desenrosque la varilla de llenado en sentido antihorario para retirarla (**véase la imagen F**).
- 18 Presione la pestaña de liberación y tire hacia adelante del adaptador del frasco para sacar el cartucho del equipo (**véase la imagen G**).
- 19 Desenrosque el adaptador del frasco en sentido antihorario para retirarlo del conector del equipo de infusión (**véase la imagen H**).
- 20 Siga las instrucciones de los reglamentos locales para eliminar correctamente las agujas, cartuchos, componentes del equipo y equipos de infusión usados.
- 21 Abra la aplicación móvil Tandem Mobi en su teléfono inteligente.
- 22 En la barra de navegación, toque **Actions** (Acciones) y luego **Load Cartridge** (Cargar cartucho).
- 23 **Vaya a la parte frontal** para continuar con las instrucciones.

