




BOMBA DE INSULINA T:SLIM X2

## Cargar un cartucho




Antes de comenzar, asegúrese de llenar un cartucho nuevo con insulina. Encontrará instrucciones detalladas **en el lado posterior**.

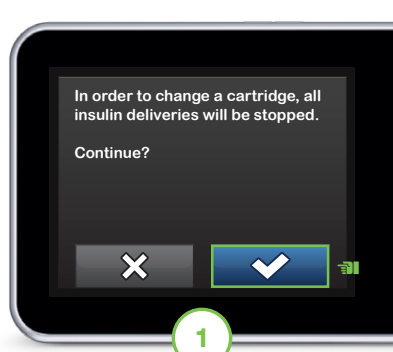


1

Toque el menú **Options (Opciones)** y después toque **Load (Cargar)**. Toque **Change Cartridge (Cambiar cartucho)**. Toque  para confirmar que se suspenderán las administraciones de insulina.

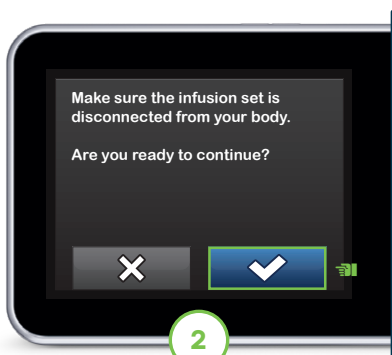


2

Desconecte el equipo de infusión del sitio de inserción en el cuerpo del usuario y toque  para continuar.

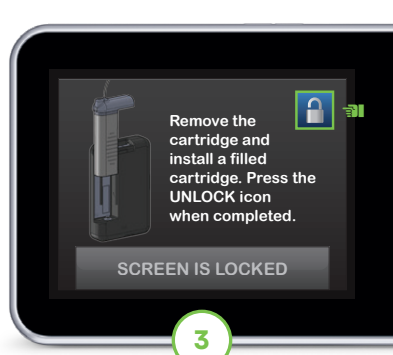

3

Saque el cartucho usado. Toque el icono de desbloqueo después de instalar el cartucho nuevo. Toque  para continuar.

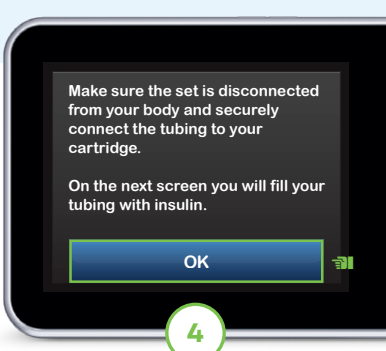

4

Conecte el tubo del equipo de infusión al respectivo conector en el cartucho. Toque **OK** para confirmar que el equipo de infusión está todavía desconectado del cuerpo del usuario.



5

Sostenga la bomba y el tubo verticalmente para asegurarse de expulsar primero el aire que pueda haber en el cartucho. Toque **START (INICIAR)**. La bomba emitirá un pitido o vibrará periódicamente mientras se llene el tubo.



6

Toque **STOP (SUSPENDER)** cuando salgan tres gotas de insulina por el extremo del tubo del equipo de infusión. Toque **DONE (LISTO)** para confirmar.



7


Toque **Fill Cannula (Llenar cánula)**. Inserte el equipo de infusión nuevo o reconecte el tubo lleno al sitio; luego toque **✓** para continuar.

**Nota:** Salte al paso 9 si no insertó un equipo de infusión nuevo o si está usando un equipo de infusión TruSteel.




Toque **Edit Fill Amount**  
**(Editar cantidad de llenado).**

Seleccione la cantidad necesaria. En las instrucciones del equipo de infusión encontrará información sobre la cantidad adecuada de llenado de la cánula. Toque **START (INICIAR).**

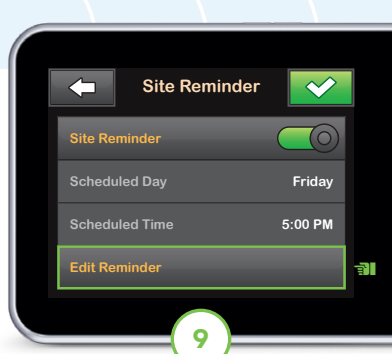

Al finalizar el llenado de la cánula, el usuario podrá establecer un recordatorio de cambio del sitio ("Site Reminder"). Toque  si está correcto. Toque **Edit Reminder (Editar recordatorio)** si hay que ajustar algo.

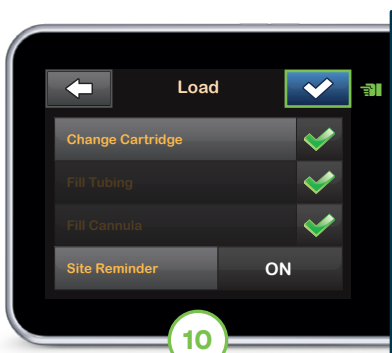

Toque  para continuar. Se mostrará un recordatorio de hacerse una prueba de glucemia en 1 o 2 horas.





Toque  para confirmar que se reanuden todas las administraciones de insulina. Aparecerá la pantalla **RESUMING INSULIN (REANUDACIÓN DE LA INSULINA).**

## Llenado de un cartucho de la bomba t:slim X2

**Nota:** Estas instrucciones sirven de referencia para los cuidadores que ya estén familiarizados con el uso de bombas de insulina y con la insulino terapia en general. No se muestran todos los diagramas o pantallas. Para obtener información más detallada sobre el manejo de la bomba de insulina t:slim X2, consulte su respectiva guía del usuario.

- 01 Inspeccione el envase de la jeringa con la aguja y deseche cualquier producto que esté dañado.
- 02 Lávese bien las manos. Con una toallita con alcohol, limpie el tapón de goma del frasco de insulina (que debe estar a temperatura ambiente).
- 03 Gire la aguja firmemente en la jeringa. Quite cuidadosamente la tapa protectora de la aguja tirando de ella hacia afuera.
- 04 Introduzca aire en la jeringa hasta la cantidad de insulina deseada.
- 05 Con el frasco de insulina en posición vertical, inserte la aguja en el frasco. Inyecte el aire de la jeringa en el frasco. Mantenga la presión en el émbolo de la jeringa (**imagen A**).
- 06 Aún con la aguja dentro del frasco, gire el frasco y la jeringa boca abajo. Suelte el émbolo de la jeringa. La insulina comenzará a fluir del frasco a la jeringa (**imagen B**).

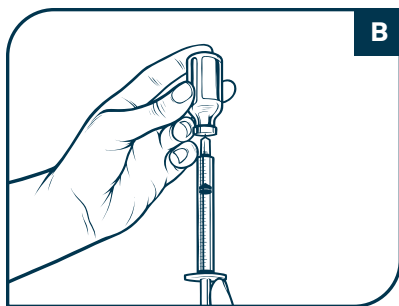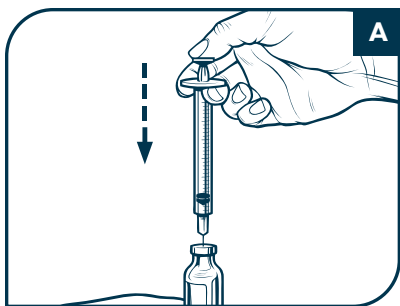





**Información importante de seguridad:** Venta bajo receta. Las bombas de insulina Tandem están destinadas a la administración subcutánea de insulina, en tasas fijas y variables, para el manejo de la diabetes mellitus en personas insulino dependientes. La bomba de insulina t:slim X2 está aprobada para personas mayores de 6 años. Para ver información importante de seguridad, visite [tandemdiabetes.com/safetyinfo](http://tandemdiabetes.com/safetyinfo).

© 2023 Tandem Diabetes Care, Inc. Reservados todos los derechos. Tandem Diabetes Care y t:slim X2 son marcas registradas o comerciales de Tandem Diabetes Care, Inc. en Estados Unidos y/u otros países. ML-1008734\_B



**Extracción de insulina:** Al llenar la jeringa durante este paso de llenado del tubo, añada aproximadamente 45 unidades a la cantidad total de insulina que desee tener disponible para administrar.

- 07 Tire lentamente del émbolo hasta la cantidad deseada de insulina.
- 08 Mientras la jeringa aún esté boca abajo, golpéela ligeramente para que las burbujas de aire (de haberlas) suban hasta la parte superior (**imagen C**). Luego empuje lentamente el émbolo hacia arriba para expulsar las burbujas de aire (de haberlas) de vuelta al frasco.
- 09 Si todavía quedan burbujas de aire en la jeringa, repita el paso 8. Si no hay burbujas de aire, retire la aguja de llenado del frasco.
- 10 Inspeccione el envase del cartucho y deseche el producto si está dañado.
- 11 Abra el envase y retire el cartucho.
- 12 Sostenga el cartucho en posición vertical (**imagen D**) e inserte con cuidado la aguja en el puerto blanco de llenado de insulina.

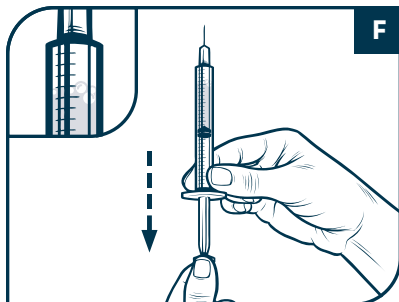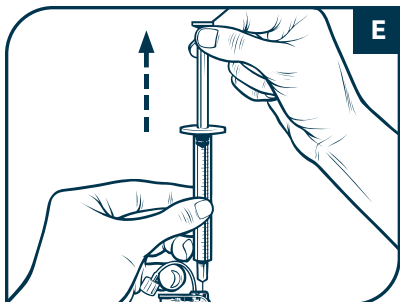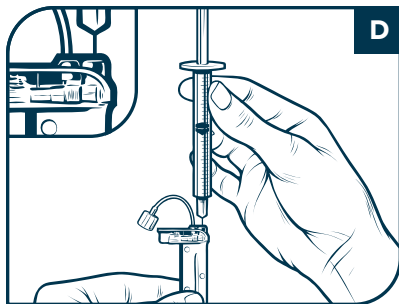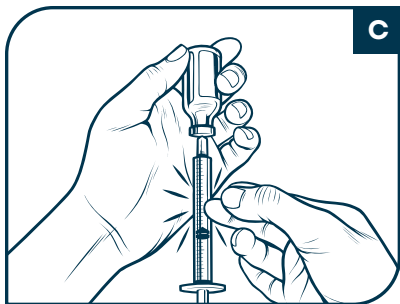

La aguja no está diseñada para insertarse por completo, así que no la fuerce.

- 13 Manteniendo la jeringa alineada verticalmente con el cartucho y la aguja dentro del puerto de llenado, tire del émbolo una vez hasta retraerlo por completo (**imagen E**). Esta acción eliminará el aire restante (de haberlo) del cartucho. Las burbujas subirán hacia el émbolo.
- 14 Compruebe que la aguja todavía esté en el puerto de llenado y suelte el émbolo. La presión tirará del émbolo a su posición neutral, pero no empujará el aire de vuelta hacia el interior del cartucho.
- 15 Retire la aguja del puerto de llenado.
- 16 Ponga la jeringa boca arriba y tire del émbolo hacia abajo (**imagen F**). Dele golpecitos suaves al cilindro para asegurarse de que las burbujas de aire (de haberlas) suban hasta la parte superior.
- 17 Empuje suavemente el émbolo para eliminar las burbujas de aire hasta que la insulina llene el conector de la aguja y salga una gota de insulina por la punta de la aguja (**imagen G**).
- 18 Vuelva a insertar la aguja en el puerto de llenado y llene lentamente el cartucho con insulina (**imagen H**). Es normal sentir cierta contrapresión mientras se empuja el émbolo.
- 19 Mantenga la presión en el émbolo mientras retira la aguja del cartucho. Verifique que el cartucho no tenga pérdidas. Si detecta pérdidas de insulina, deseche el cartucho y repita todo el proceso con un cartucho nuevo.
- 20 Siga siempre los reglamentos comunitarios para la eliminación de las agujas, las jeringas, los cartuchos y los equipos de infusión usados.
- 21 Las instrucciones **continúan en el lado frontal**.

