



SISTEMA TANDEM MOBI

## Sugerencias de uso



El sistema Tandem Mobi es tan pequeño que se puede usar en casi cualquier lugar, lo que ofrece una mayor discreción y comodidad a los usuarios. Esta guía contiene algunos consejos sobre cómo usar el sistema y cómo cuidarlo.



Póngaselo sobre el cuerpo con un parche adhesivo liviano\* o sujételo a la ropa con un clip.




Deslízelo en el bolsillo de monedas de sus *jeans* (sí: ¡es así de pequeño!)

### Libertad para desconectarse

La bomba Tandem Mobi se puede desconectar fácilmente del sitio del equipo de infusión para hacer una diversidad de actividades, como deportes, sauna, natación y otras actividades espontáneas.

Sus diferentes opciones de ángulos de inserción y longitudes del tubo brindan aún más formas de ponerse la bomba. **Pase al dorso** para ver una lista completa de opciones.

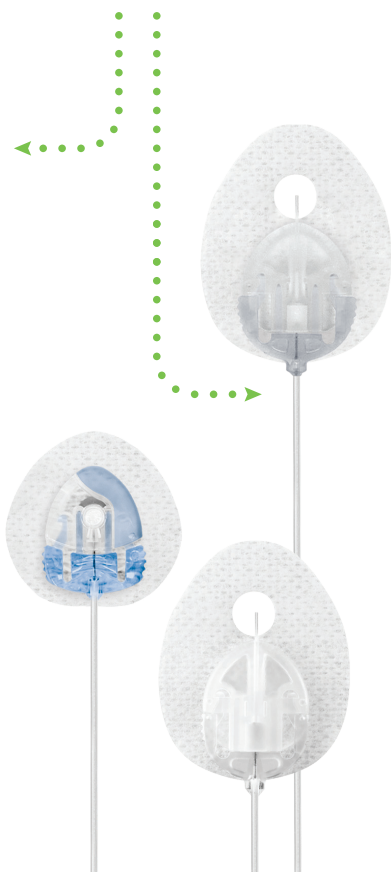



## Asuntos para considerar

- ✓ Oriente el parche adhesivo de manera que puedan verse los indicadores LED de estado en la bomba de insulina.
- ✓ Para evitar que se estire el tubo, se recomienda colocar el equipo de infusión antes de poner el parche adhesivo.
- ✓ No se ponga ni coloque la bomba a más de 12 pulgadas por encima del sitio de la infusión. También se recomienda que la bomba y el teléfono inteligente se usen al menos a 6.5 pulgadas de distancia.
- ✓ Cuando se integra a un sistema de monitoreo continuo de glucosa (MCG), la bomba debe estar en el mismo lado del cuerpo donde esté el sensor del MCG.
- ✓ Evite exponer la bomba a imanes o productos con imanes.
- ✓ Tenga cuidado al aplicarse protectores solares, repelentes de insectos y lociones. Algunos productos pueden hacer que la bomba y el cartucho de plástico se agrieten, lo que podría ocasionar administraciones excesivas o insuficientes de la insulina.†

† Si el sistema Tandem Mobi queda expuesto a productos químicos domésticos o productos para el cuidado de la piel, asegúrese de limpiar la bomba inmediatamente. Luego de aplicarse productos para el cuidado de la piel (como protectores solares y repelentes de insectos), lávese siempre las manos antes de manipular la bomba o el cartucho. Si tiene que aplicarse cualquiera de estos productos a la piel, le recomendamos desconectar temporalmente el sitio de infusión del cuerpo durante la aplicación y lavarse muy bien las manos antes de volver a conectarlo al cuerpo. También es importante evitar que el cartucho lleno se exponga al exceso de luz solar directa, ya que eso podría afectar la eficacia de la insulina.

## Cómo limpiar la bomba

Se recomienda lo siguiente para la bomba Tandem Mobi:

- ✓ Limpiarla periódicamente, especialmente si ha estado expuesta a suciedad, polvo y productos para el cuidado de la piel
- ✓ Para limpiarla, pásele un paño sin pelusa humedecido con agua tibia y un poquito de detergente suave para platos
- ✓ No la sumerja nunca en agua ni use ningún otro líquido para limpiarla
- ✓ Seque la bomba con una toalla suave

■ **Nota:** Antes de la limpieza, siempre suspenda la administración de insulina, desconecte el equipo de infusión y saque el cartucho.



## Los usuarios pueden tener tranquilidad en caso de inmersión accidental en el agua.

La bomba de insulina Tandem Mobi es resistente al agua hasta una profundidad de 8 pies durante un máximo de 2 horas (clasificación IP28). No recomendamos hacer natación, buceo, surf ni ninguna otra actividad que podría hacer que la bomba estuviera sumergida en el agua durante un período de tiempo prolongado.

## Equipos de infusión disponibles

Una parte importante del éxito de la terapia con la bomba de insulina es encontrar el equipo de infusión adecuado. Hay varias opciones entre las cuales elegir.

Opciones	Tubos	Ángulos	Cánula
AutoSoft XC	5, 23, 32 o 43 pulgadas	90°	6 o 9 mm
AutoSoft 30	23 o 43 pulgadas	30°	13 mm
AutoSoft 90	23 o 43 pulgadas	90°	6 o 9 mm
TruSteel	23 o 32 pulgadas	90°	6 o 8 mm
VariSoft	23, 32 o 43 pulgadas	20°-45°	13 o 17 mm

\*El parche adhesivo de Tandem Mobi se vende aparte.

**Información de seguridad importante:** VENTA BAJO RECETA. **Indicaciones de uso:** Bomba de insulina Tandem Mobi con tecnología interoperable: La bomba de insulina Tandem Mobi con tecnología interoperable (la bomba) está destinada a la administración subcutánea de insulina a tasas fijas y variables para el manejo de la diabetes *mellitus* en personas dependientes de insulina. La bomba puede comunicarse de forma fiable y segura con dispositivos compatibles conectados por vía digital —lo que incluye un software de administración automatizada de insulina— para recibir, ejecutar y confirmar los comandos de estos dispositivos. La bomba está diseñada para usarse en el hogar en un solo paciente, y requiere una receta médica. La bomba está indicada para personas mayores de 6 años de edad.

**Advertencia:** No use la bomba de insulina Tandem Mobi sin antes consultar con su profesional del cuidado de la salud. El uso de ajustes incorrectos podría ocasionar una administración excesiva o deficiente de la insulina (lo que podría producir, respectivamente, hipoglucemia o hiperglicemia). Visite [tandemdiabetes.com/safetyinfo](https://tandemdiabetes.com/safetyinfo) para ver más información importante de seguridad.

Estos [equipos de infusión](#) están indicados para la infusión subcutánea de insulina para el tratamiento de la diabetes. Estos equipos de infusión están indicados para un solo uso. Para informarse sobre contraindicaciones, advertencias, precauciones y otra información importante, consulte las instrucciones de uso adjuntas a los equipos de infusión.

© 2023 Tandem Diabetes Care, Inc. Todos los derechos reservados. Tandem Diabetes Care, el logotipo de Tandem, AutoSoft, VariSoft, TruSteel y Tandem Mobi son marcas registradas o comerciales de Tandem Diabetes Care, Inc. en Estados Unidos y/u otros países. Dexcom, Dexcom G6 y todo logotipo y marca de diseño relacionados son marcas registradas o comerciales de Dexcom, Inc. en Estados Unidos y/u otros países. ML-1013527\_A



**TANDEM**  
Diabetes Care

(877) 801-6901  
[tandemdiabetes.com](https://tandemdiabetes.com)

PARA USO EXCLUSIVO  
EN ESTADOS UNIDOS

